

DERMOZOIL®

— CREAM —

Obnovuje a regeneruje

kůži



OZOILE®

UNIKÁTNÍ PATENT
Stabilní Ozonidy

INDIKACE

Dermozoil® krém je určen k prevenci a léčbě dermatitidy a dermatózy různé etiologie, jako je atopická dermatitida, ekzematózní dermatitida a jiné dermatologické patologie charakterizované zánětem, podrážděním, erytémem, xerózou, svěděním, odlupováním, infekcí, změnami flóry a kožní bariéry, jako je akné a psoriáza. Dermozoil® krém je také určen k prevenci a léčbě akutních a chronických kožních lézí různé etiologie.

HLAVNÍ SLOŽKY: Ozoile® (stabilní ozonidy s vitamínem E acetátem), výtažek z kořene listnatce pichlavého, výtažek z květu měsíčku lékařského, z listu černého rybízu, z přesličky rolní, sodná sůl kyseliny hyaluronové, kyselina thioktová.

Ozoile® (stabilní ozonidy s vitamínem E acetátem) je skupina inovativních molekul získaných patentovaným procesem; má protizánětlivé účinky, působí proti svědění, proti hypoxii a vytváří nepříznivé prostředí pro patogenní mikrobiální proliferaci a podporuje procesy na obnovu tkání.

POUŽITÍ

Naneste produkt přímo na postiženou oblast. Aplikujte krém Dermozoil® dvakrát nebo třikrát za den. Při léčbě akutní a chronické kožní léze s různou etiologií lze produkt aplikovat přímo na celou postiženou oblast (zvláště během granulační fáze) a do okolí 5 cm. Doba léčby je závislá na velikosti ošetřované oblasti a rychlosti reakce na terapii.

INSTRUKCE

Lokální aplikace. Nepožívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený a po uplynutí doby použitelnosti. Před nanášením si dobře umyjte ruce. Po aplikaci tubu pečlivě uzavřete a skladujte v neporušeném obalu na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření. Uchovávejte nejlépe mezi 5 °C a 35 °C. Po otevření spotřebujte do 6 měsíců.

KONTRAINDIKACE

Dermozoil® krém je dobře snášen. Nepoužívejte v případě zjištění přecitlivělosti na některé složky přípravku. Nejsou známé žádné případy vedlejších účinků. V případě, že dojde k nežádoucím reakcím, přestaňte krém používat a poraďte se se svým lékařem. Nejsou známy žádné případy předávkování. Nejsou známy žádné interakce s léky a jinými léčivými látkami.

BALENÍ
100 ml tuba

MIKROBIOLOGICKÝ TEST
CYTOTOXICKÝ TEST
KOŽNÍ TEST
BEZ LEPKU
BEZ BARVIV
BEZ ALERGENŮ

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK II B  0425



Výhradní distributor
pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.,
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz



ERBAGIL srl
Via L.Settembrini, 13 Telese Terme BN Italy
www.erbagil.com

Rev. 01 09/2020

DERMOZOIL®

— CREAM —

Obnovuje a regeneruje

kožu



OZOILE®

UNIKÁTNY PATENT
Stabilné Ozonidy

INDIKÁCIE

Dermozoil® krém je určený na prevenciu a liečbu dermatitídy a dermatózy odlišnej etiológie, ako je atopická dermatitída, ekzematózna dermatitída a iné dermatologické patológie charakterizované zápalom, podráždením, erytémom, xerózou, svrbením, odlupovaním, infekciou, zmenami flóry a kožnej bariéry, ako je akné a psoriáza.

Dermozoil® krém je tiež určený na prevenciu a liečbu akútnych a chronických kožných lézií odlišnej etiológie.

HLAVNÉ ZLOŽKY: Ozoile® (stabilné ozonidy s vitamínom E acetátom), výťažok z koreňa listnatka pichľavého, výťažok z kvetu nechtíka lekárskeho, z listu čiernych ríbezlí, z prasličky rolnej, sodná soľ kyseliny hyalurónovej, kyselina lipoová.

Ozoile® (stabilné ozonidy s vitamínom E acetátom) je skupina inovatívnych molekúl získaných patentovaným procesom; má protizápalové účinky, pôsobí proti svrbeniu, proti hypoxii a vytvára nepriaznivé prostredie pre patogénnu mikrobiálnu proliferáciu a podporuje procesy na obnovu tkanív.

POUŽITIE

Naneste produkt priamo na postihnutú oblasť. Aplikujte Dermozoil® krém dvakrát alebo trikrát za deň. Pri liečbe akútnej a chronickej kožnej lézie s rôznou etiológiou možno produkt aplikovať priamo na celú postihnutú oblasť (hlavne počas granulačnej fázy) a do okolia 5 cm. Doba liečby je závislá na veľkosti ošetrovanej oblasti a rýchlosti reakcie na terapiu.

INŠTRUKCIE

Lokálna aplikácia. Nepožívajte. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte, ak je obal poškodený a po uplynutí doby použiteľnosti.

Pred nanášaním si dobre umyte ruky. Po aplikácii tubu starostlivo uzatvorte a skladujte v neporušenom obale na chladnom a suchom mieste mimo zdroja tepla a priame slnečné žiarenie. Uchovávajte najlepšie medzi 5 °C a 35 °C.

Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

KONTRAINDIKÁCIE

Dermozoil® krém je dobre znášaný.

Nepoužívajte v prípade zistenia precitlivenosti na niektoré zložky prípravku.

Nie sú známe žiadne prípady vedľajších účinkov. V prípade, že dôjde k nežiadúcim reakciám, prestaňte krém používať a poraďte sa so svojim lekárom.

Nie sú známe žiadne prípady predávkovania.

Nie sú známe žiadne interakcie s liekmi a inými liečivými látkami.

BALENIE
100 ml tuba

MIKROBIOLOGICKÝ TEST
CYTOTOXICKÝ TEST
KOŽNÝ TEST
BEZ LEPKU
BEZ FARBÍV
BEZ ALERGÉNOV

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA II B  0425



**Výhradný distribútor
pre ČR a SR:**

EMPOLAS s.r.o.,
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.sk

 **ERBAGIL srl**
Via L.Settembrini, 13 Telese Terme BN Italy
www.erbagil.com

Rev. 01 09/2020