

RIGENOMA®

KRÉM

Obnovuje a regeneruje kůži



INDIKACE

RIGENOMA® krém s Ozoile® je určen pro prevenci a léčbu akutních a chronických kožních lézí různé etiologie i v případě rizika infekce u proleženin, cévních, metabolických, tlakových vředů, chirurgických ran, traumatických poranění a poškození při chemo a radioterapii. RIGENOMA® krém je také určen k prevenci a léčbě patologických kožních stavů, jako je akné, lupénka, dermatidy a dermatózy s různou etiologií, jako je atopická dermatitida, ekzematózní dermatitida, které jsou všechny charakterizovány těmito projevy: zánět, podráždění, erytém, xeróza, svědění, olupování kůže, možné infekce, změny mikroflory a kožní bariéry.

HLAVNÍ SLOŽKY:

Ozoile® (stabilní ozonidy s acetátem vitamínu E), výtažek z kořene listnatce pichlavého, výtažek z květu měsíčku lékařského, výtažek z listu černého rybízu, výtažek z přesličky rolní, hyaluronát sodný, kyselina thioktová.

Ozoile®, stabilní ozonidy s acetátem vitamínu E, je sloučenina inovativních molekul získaných patentovaným procesem, která má protizánělivý a protisvědčivý účinek, působí proti hypoxii, vytváří nepříznivé prostředí k množení patogenních mikrobu a podporuje procesy obnovy tkání.

JAK POUŽÍVAT

Naneste RIGENOMA® krém přímo na postiženou oblast. Při léčbě akutních a chronických kožních lézí různé etiologie, nejprve očistěte místo RIGENOMA® čistícím roztokem bez oplachování, následně aplikujte RIGENOMA® sprej na dno léze a naneste homogenní vrstvu RIGENOMA® krému na lézi a na kůži do okolí léze cca 5 cm. RIGENOMA® krém lze aplikovat přímo na celou poraněnou oblast zejména při granulaci a fázi reepitelizace. RIGENOMA® krém lze použít v kombinaci s

RIGENOMA® plynem k zakrytí léze. Pomáhá ránu chránit a uchovávat vlhké prostředí pro podporu obnovy a regenerace tkáně aktivním působením na spodině rány. Aplikujte RIGENOMA® krém jednou až dvakrát denně nebo v případě obvazu a okluzivního převazu každé tři respektive čtyři dny podle doporučení lékaře. Při léčbě dermatologických problémů aplikujte přípravek 2 až 3krát denně. Doba léčby je závislá na rychlosti reakce na aplikaci krému.

UPOZORNĚNÍ

K zevnímu lokálnímu použití. Nepožívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený a v případě vypršení data spotřeby. Datum expirace se vztahuje na neporušený a správně skladovaný produkt. Přípravek uchovávejte na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Skladujte v teplotě mezi 5°C a 35°C. Před použitím si dobře umyjte ruce. Po použití pečlivě tubu uzavřete. Po otevření se doporučuje výrobek spotřebovat do 6 měsíců.

KONTRAINDIKACE

Krém RIGENOMA® je dobře snášen. Nepoužívejte v případě zjištění přecitlivělosti na některé složky přípravku. Nejsou známy žádné případy senzibilizace nebo vedlejších nežádoucích projevů. Pokud k nim dojde, přestaňte přípravek používat a poradte se se svým lékařem. Nejsou známy žádné případy předávkování. Nejsou k dispozici žádné známé interakce s léky a léčivými látkami.

BALENÍ

Tuba 40 ml, 100 ml

Zdravotnický prostředek

BEZ LEPKU
BEZ BARVIV
BEZ ALERGENŮ

Výhradní distributor pro ČR a SR:

 EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz

 ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 02 01/2023



RIGENOMA®

KRÉM

Obnovuje a regeneruje kožu



INDIKÁCIE

RIGENOMA® krém s OzoilE® je určený na prevenciu a liečbu akútnych a chronických kožných lézií rôznej etiológie aj v prípade rizika infekcie u preležanín, cievnych, metabolických, tlakových vredov, chirurgických rán, traumatických poranení a poškodenia pri chemo a rádioterapii. RIGENOMA® krém je tiež určený na prevenciu a liečbu patologických kožných stavov, ako je akné, psoriáza, dermatitída a dermatózy s rôznou etiológiou, ako je atopická dermatitída, ekzematózna dermatitída, ktoré sú všetky charakterizované týmito prejavmi: zápal, podráždenie, erytém, xeróza, svrbenie, olupovanie kože, možné infekcie, zmeny mikroflóry a kožnej bariéry.

HLAVNÉ ZLOŽKY: OzoilE® (stabilné ozonidy s acetátom vitamínu E), výťažok z koreňa listnatca pichlavého, výťažok z kvetu nechtíka lekárskeho, výťažok z listu čiernych ríbezlí, výťažok z prasličky roľnej, hyaluronát sodný, kyselina tioktová. OzoilE®, stabilné ozonidy s acetátom vitamínu E, je zlúčenina inovatívnych molekúl získaných patentovaným procesom, ktorá má protizápalový a protisvrbivý účinok, pôsobí proti hypoxii, vytvára nepriaznivé prostredie pre množenie patogénnych mikróbov a podporuje procesy obnovy tkanív.

AKO POUŽÍVAŤ

Naneste RIGENOMA® krém priamo na postihnutú oblasť. Pri liečbe akútnych a chronických kožných lézií rôznej etiológie, najprv očistite miesto RIGENOMA® čistiacim roztokom bez oplachovania, následne aplikujte RIGENOMA® sprej na dno lézie a naneste homogénnu vrstvu RIGENOMA® krému na léziu a na koži do okolia lézie cca 5 cm. RIGENOMA® krém môžete aplikovať priamo na celú poranenú oblasť najmä pri granulácii a fáze reepitelizácie. RIGENOMA® krém je možné použiť v kombinácii s RIGENOMA® gázou na zakrytie lézie.

Pomáha ranu chrániť a uchovávať vlhké prostredie pre podporu obnovy a regeneráciu tkaniva aktívnym pôsobením na spodine rany. Aplikujte RIGENOMA® krém raz až dvakrát denne alebo v prípade obväzu a okluzívneho preväzu každé tri respektíve štyri dni podľa odporúčania lekára. Pri liečbe dermatologických problémov aplikujte prípravok 2 až 3krát denne. Doba liečby je závislá na rýchlosti reakcie na aplikáciu krému.

UPOZORNENIE

Na vonkajšie lokálne použitie. Nepožívajte. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte po dátume expirácie. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Dátum expirácie sa vzťahuje na nedotknutý a dokonale uchovaný prípravok. Skladujte v suchu, chlade, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte najlepšie medzi 5 °C a 35 °C. Pred použitím prípravku si dôkladne umyte ruky. Po použití tubu pevne uzavrite. Odporúčaná doba použiteľnosti od prvého otvorenia produktu je 6 mesiacov.

KONTRAINDIKÁCIE

RIGENOMA® krém je dobre znášaný. Nepoužívajte v prípade zistenia precitlivenosti na niektoré zložky prípravku. Zatiaľ nie sú známe žiadne prípady senzibilizácie, ani prípady vedľajších účinkov. Ak sa vyskytnú, prerušte používanie prípravku a obráťte sa na svojho lekára. Nie sú známe žiadne prípady predávkovania. Nie sú známe žiadne interakcie alebo intolerancie s inými látkami.

BALENIE

Tuba 40, 100 ml

Zdravotnícka pomôcka

BEZ LEPKU
BEZ FARÍBV
BEZ ALERGÉNOV

Výhradný distribútor pre ČR a SR:

 EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.sk

 ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 02 01/2023

