

# VULVOVAGI®

## KRÉM

**Rychlá ochrana a zklidnění,  
inovace pro lokální použití  
na genitálie**

Ochranný efekt



**OZOILE®**  
UNIKÁTNÍ PATEŇT  
Stabilní Ozonidy

VULVOVAGI® KRÉM s OZOILE® vytváří ochranný film proti zevním vlivům a otěru. Účinný proti podráždění, deskvamaci (olupování), svědění, pálení, působí proti oxidačnímu stresu, normalizuje pokožku a sliznici a podporuje správnou reepitelizaci (tkáňovou regeneraci).

### HLAVNÍ SLOŽKY

OZOILE® (Stabilní ozonidy s vitamínem E acetátem), hyaluronát sodný, bílý včelí vosk, olej z listů čajovníkového stromu (Melaleuca Alternifolia).

### OZOILE®

Působí proti podráždění, svědění, oxidačnímu stresu a tvoří nepříznivé prostředí pro změny mikrobioty.

Účinný proti zarudnutí, svědění, pálení, otoku, deskvamaci (olupování) a proti rozvoji degenerativních procesů. Přináší kyslík do tkání a podporuje rychlou reepitelizaci tkáně.

### VITAMÍN E ACETÁT

Zklidňující efekt, zabraňuje poškození zdravých buněk a působení volných radikálů.

### BÍLÝ VČELÍ VOSK (CERA ALBA)

Vytváří ochranný film, zadržuje vlhkost a poskytuje ochrannou bariéru urychlující reepitelizaci tkáně.

### HYALURONÁT SODNÝ

Přispívá k fyzické ochranně ošetřované oblasti díky své viskoelastičnosti. Posiluje hydrataci a reepitelizaci. Zajišťuje tonus a turgor (pevnost, plnost) tkání.

### OLEJ Z LISTŮ ČAJOVNÍKOVÉHO STROMU (MELALEUCA ALTERNIFOLIA)

Zvyšuje účinek složky OZOILE®.

### INDIKACE

Lokální použití na kůži a sliznici. Pro prevenci a ošetření při zánětu genitální oblasti. V případě podráždění, deskvamace (olupování), pálení, svědění, otoku, oxidačnímu stresu a při narušení fyziologické ochranné slizniční bariéry způsobené patogeny. VULVOVAGI® krém vytváří ochrannou bariéru, která podporuje hydrataci a obnovu hydro-lipidového filmu, normalizuje pokožku a sliznici a podporuje správnou reepitelizaci tkáně.

### JAK POUŽÍVAT

Aplikujte malé množství ráno a večer na postiženou oblast a do jejího okolí, po předchozím očištění oblasti speciálním mycím roztokem IDROZOIL®. Doba léčby se liší podle rychlosti reakce organismu na terapii.

### UPOZORNĚNÍ

Lokální použití. Nepožívejte. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Nepoužívejte v případě poškození obalu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Datum expirace se vztahuje na produkt správně skladovaný v neporušeném obalu. Skladujte na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření. Skladujte nejlépe mezi 5 °C a 35 °C. Před použitím zdravotnického prostředku si důkladně umyjte ruce. VULVOVAGI® krém je dobře snášen. Nejsou známy žádné případy vedlejších účinků nebo alergických reakcí. Nepoužívejte v případě zjištěné přecitlivělosti na výrobek nebo některé jeho složky. Pokud by nastaly, přerušete používání a obraťte se na svého lékaře.

### BALENÍ

10 ks sáčků po 3 ml

BEZ LEPKU

BEZ BARVIV

BEZ ALERGENŮ

Zdravotnický prostředek

Výhradní distributor pro ČR a SR:  
EMPOLAS s.r.o.  
Česká republika  
info@empolas.com  
www.ozonidy.cz

ERBAGIL s.r.l  
Via L. Settembrini, 13  
82037 Telesse Terme (BN) Italy  
www.erbagil.com

REV. 00 06/2024



# VULVOVAGI®

## KRÉM

**Rýchla ochrana a upokojenie, inovácia určená na lokálne použitie na genitáliu**  
**Ochranný efekt**



**OZOILE®**  
UNIKÁTNY PATENT  
Stabilné Ozonidy

VULVOVAGI® KRÉM s OZOILE® vytvára ochranný film proti vonkajším vplyvom a treniu. Účinný proti podráždeniu, deskvamácii (olupovaniu), svrbeniu, páleniu, pôsobí proti oxidačnému stresu, normalizuje pokožku a sliznicu a podporuje správnu reepitelizáciu (regeneráciu tkaniva).

### HLAVNÉ ZLOŽKY

OZOILE® (Stabilné ozonidy s vitamínom E acetátom), hyaluronát sodný, biely včelí vosk, olej z listov čajovníka (Melaleuca Alternifolia).

### OZOILE®

Pôsobí proti podráždeniu, svrbeniu, oxidačnému stresu a vytvára nepriaznivé prostredie pre zmeny mikrobioty.

Účinný proti začervenaniu, svrbeniu, páleniu, opuchu, deskvamácii (olupovaniu) a proti rozvoju degeneratívnych procesov. Prináša kyslík do tkanív a podporuje rýchlu reepitelizáciu tkaniva.

### VITAMÍN E ACETÁT

Zmierňujúci efekt, bráni poškodeniu zdravých buniek a pôsobeniu voľných radikálov.

### BIELY VČELÍ VOSK (CERA ALBA)

Vytvára ochranný film, udržiava vlhkosť a poskytuje ochrannú bariéru, urýchluje reepitelizáciu tkaniva.

### HYALURONÁT SODNÝ

Prispieva k fyzickej ochrane ošetrovanej oblasti vďaka svojej viskoelasticite. Posilňuje hydratáciu a reepitelizáciu. Zaisťuje tonus a turgor (pevnosť, plnosť) tkanív.

## OLEJ Z LISTOV ČAJOVNÍKOVÉHO STROMU (MELALEUCA ALTERNIFOLIA)

Zvyšuje účinok zložky OZOILE®.

### INDIKÁCIE

Lokálne použitie na koži a sliznici. Na prevenciu a ošetrovanie pri zápale genitálnej oblasti. V prípade podráždenia, deskvamácie (olupovania), pálenia, svrbenia, opuchu, oxidačného stresu a pri narušení fyziologickej ochrannnej slizničnej bariéry spôsobenej patogénmi. VULVOVAGI® krém vytvára ochrannú bariéru, ktorá podporuje hydratáciu a obnovu hydro-lipidového filmu, normalizuje kožu a sliznicu a podporuje správnu reepitelizáciu tkaniva.

### AKO POUŽÍVAŤ

Naneste malé množstvo ráno a večer na postihnutú oblasť a do jej okolia, po predchádzajúcom očistení oblasti špeciálnym umývacím roztokom IDROZOIL®. Doba liečby sa líši podľa rýchlosti reakcie organizmu na terapiu.

### UPOZORNENIE

Lokálne použitie. Nepožívajte. Uchovávať výrobok mimo dosahu detí. Nepoužívajte v prípade poškodenia obalu. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. Dátum expirácie sa vzťahuje na produkt správne skladovaný v neporušenom obale. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Skladujte najlepšie medzi 5 °C a 35 °C. Pred použitím zdravotníckej pomôcky si dôkladne umyte ruky. VULVOVAGI® krém je dobre znášaný. Nie sú známe žiadne prípady vedľajších účinkov alebo alergických reakcií. Nepoužívajte v prípade zisteného precitlivenia na výrobok alebo niektorú z jeho zložiek. Ak by nastali, prerušte používanie a obráťte sa na svojho lekára.

### BALENIE

10 ks vrecúšok po 3 ml

BEZ LEPKU

BEZ FARBÍV

BEZ ALERGÉNOV

Zdravotnícka pomôcka

Výhradný distribútor pre ČR a SR:  
EMPOLAS s.r.o.  
Česká republika  
info@empolas.com  
www.ozonidy.sk

ERBAGIL s.r.l.  
Via L. Settembrini, 13  
82037 Telesse Terme (BN) Italy  
www.erbagil.com

REV. 00 06/2024

